

EMBOSHIELD NAV6™

Устройства для защиты от дистальной эмболии

НАВИГАЦИЯ. ДОСТУП. РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ.

Навигация с новым уровнем контроля, надежности и точности

Навигация

- Проводники BareWires для дистального доступа, первой очереди и с усиленной поддержкой сконструированы с учетом анатомии сонных артерий для обеспечения успешной навигации в извитой сосудистой системе

Доступ

- Две возможности доставки фильтра по проводнику BareWire: с фиксацией и телескопическая, обеспечивают индивидуальный подход в сосуды разнообразной анатомии

Рентгеноконтрастность

- Рентгеноконтрастная кольцевая рамка позволяет контролировать аппозицию к сосуду и установку устройства

Гидрофильное покрытие

разработано для уменьшения адгезии белка и тромбоцитов

Размер пор 120 мкм

- максимально обеспечивает баланс между захватом и сохранением кровотока
- 1 мм зона без пор на дистальном кончике

.019" отступ

для извлечения фильтра

Превосходный дизайн фильтра

разработан для улучшения захватывания частиц и сохранения кровотока

Преимущество проводника BareWire


Фильтр перемещается независимо от проводника



ДОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ BAREWIRE


Для дистального доступа

Мягкий проводник BareWire с отличной гибкостью и вращением для доступа через извитую анатомию.

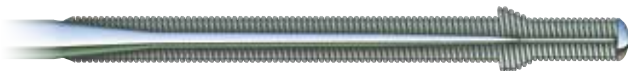

Первой очереди

Обеспечивает оптимальную гибкость и поддержку для превосходного доступа через большинство сосудов.

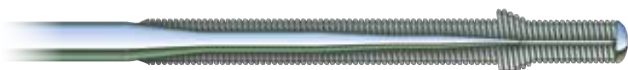


С усиленной поддержкой


Сконструирован для обеспечения дополнительной поддержки при доставке фильтра через сложные участки.



РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ ФИЛЬТРА

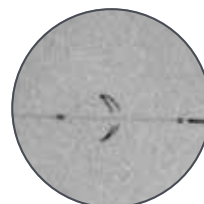

Полностью раскрытый

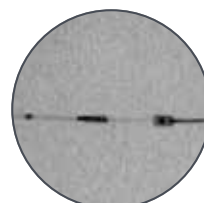

Полностью закрытый

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

EMBOSHIELD NAV6™ Устройства для защиты от дистальной эмболии					
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР ФИЛЬТРА В РАСКРЫТОМ ВИДЕ (ММ)	ДИАМЕТР РЕФЕРЕНСНОГО СОСУДА (ММ)	ДЛИНА ПРОВОДНИКА (СМ)	МИН. РАЗМЕР ИНТРОДЮСЕРА / ПРОВОДНИКОВОГО КАТЕТЕРА (F)	МИН. ВНУТР. ДИАМЕТР ИНТРОДЮСЕРА / ПРОВОДНИКОВОГО КАТЕТЕРА (ДЮЙМ)
1010132-30	6 – 8	30	6	4.3 – 5.4	5.7 – 7.3
1010132-40	6 – 8	40	6	4.3 – 5.4	5.7 – 7.3

* Устройства для защиты от дистальной эмболии EMBOSHIELD NAV6™ состоит из двух упаковок:

Упаковка

Фильтр
Катетер для удаления фильтра RX

Содержимое

(1) Катетер для введения фильтра RX, (1) Фильтр, (1) Доставляющий фильтр проводник BareWire (первой очереди, 190 см), (1) Воронка для введения, (1) Интродюсер, (1) Устройство для вращения, (1) Шприц для промывания кончика (1) Катетер для удаления фильтра RX, (1) Устройство для вращения, (1) Шприц для промывания кончика

ДОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ BAREWIRE (0.014») **		
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ТИП ПРОВОДНИКА	ДЛИНА ПРОВОДНИКА (СМ)
22444-19	Для дистального доступа	190
22445-19	Первой очереди	190
22445-31		315
22446-19	С усиленной поддержкой	190

** Проводники BareWires доступны в упаковках по 5 штук

ВНИМАНИЕ: Данная продукция предназначена только для использования врачами. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией, вложенной в упаковку изделия, для получения более подробной информации о Показаниях, Противопоказаниях, Предупреждениях, Мерах предосторожности и Побочных явлениях. **Представленная в данном буклете информация предназначена только для распространения в России и странах СНГ.**
Проверьте регистрационный статус изделия перед его использованием.
РУ № ФСЗ 2010/08232 от 17.11.2010 г.

По результатам внутреннего исследования Эбботт, данные находятся в архиве компании и могут быть предоставлены по запросу. Иллюстрации являются только представлениями художника и не должны рассматриваться как инженерные чертежи или фотографии. Фотографии были сделаны представителями компании Эбботт, находятся в архиве компании.

ООО «Эбботт Лэбораториз»

125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1.
Бизнес центр Метрополис. Тел.: +7 495 258 42 80

™ обозначает торговую марку группы компаний Эбботт.

www.AbbottVascular.com

©2019 Abbott. Все права защищены. 2-DI-1-9299-12 08-2019

